

Wetenschappelijk bewezen: Silk'n Tightra doet wat het belooft!

Veilig, pijnloos en zeer
effectief...

Als wereldwijde leider in professionele, esthetische apparaten biedt Silk'n u graag het beste van het beste. Daarom laten wij onze producten regelmatig wetenschappelijk onderzoeken en communiceren wij helder en transparant alle resultaten. In dit onderzoeksrapport leest u de belangrijkste (en uiterst positieve) conclusies van een objectieve klinische studie van Silk'n Tightra: het allereerste apparaat voor thuisgebruik dat door middel van energie uit bipolaire radiofrequentie het vrouwelijk intiem welbevinden verbetert.

Na een bevalling en bij hormonale veranderingen zoals de menopauze kunnen het gevoel en uiterlijk van de intieme delen van een vrouw veranderen. Daarnaast voelen veel vrouwen zich minder zeker doordat ze minder voelen of minder controle hebben over de blaas. Maar met de Silk'n Tightra kunnen de symptomen in slechts vier weken verdwijnen, zonder medische ingrepen!

Het onderzoek

Tijdens een klinisch onderzoek*, uitgevoerd door het onafhankelijk internationaal onderzoeksinstituut proDERM (2019), werden zowel het gebruik als de veiligheid en effectiviteit van Silk'n Tightra onderzocht. Dit apparaat is speciaal bedoeld voor vrouwen die last hebben van licht urineverlies, vaginale laxiteit (slapte van de vaginawand) en andere vaginale ongemakken die het dagelijks leven, de seksuele belevenis en het zelfvertrouwen op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.

Het onderzoek bestond per persoon uit twaalf inwendige behandelsessies voor zelfgebruik, drie keer per week 20 minuten, vier weken lang. Alleen de deelnemers die ook graag het uiterlijk van hun schaamlippen wilden verbeteren, voerden in de eerste maand twee keer per week acht extra uitwendige behandelingen uit.

De behandelingen werden dus zowel vaginaal inwendig als uitwendig op de schaamlippen uitgevoerd, precies zoals beschreven staat in de gebruiksaanwijzing. Na de vier weken durende onderzoeksperiode volgde een net zo lang vervolgonderzoek, waarbij de behandelingen ter onderhoud werden herhaald.

Representatieve proefpersonen

28 verschillende vrouwen (één vrouw uitgesloten) deden mee aan het onderzoek. Ze waren tussen de 25 en 65 jaar, 17 vrouwen vielen in de leeftijdsgroep van 40 tot en met 65 jaar en tien vrouwen waren tussen de 25 en 40 jaar. Ze hadden allemaal last van het Vaginaal Relaxatie Syndroom (verwijde vagina) en urineverlies en wilden graag een vaginale verjongingsbehandeling. Verder waren zij minimaal één keer vaginaal bevallen.

Veilig in gebruik

Een veiligheidsanalyse was een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Eén van de conclusies was dat er geen onverwachte bijwerkingen werden gerapporteerd door de 27 deelnemers.

Onderdelen onderzoek

Om de effectiviteit van Silk'n Tightra goed te kunnen meten, is er tijdens het onderzoek hoofdzakelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde enquêtes op het gebied van:

- stressincontinentie (licht urineverlies);
- seksuele functionaliteit;
- vaginale laxiteit (slapte van de vaginawand);
- andere vaginale ongemakken (irritaties, droogheid, jeuk, branderig gevoel en pijn);

Ook werd er een enquête afgenomen om de algemene tevredenheid over het apparaat en het gebruik ervan te meten alsook de verbetering van het uiterlijk van de vulva.



Op elk onderdeel behaalde Silk'n Tightra de gewenste resultaten. Zo was er...

- ... een grote verbetering wat betreft incontinentieklachten. Bij **70%** van de vrouwen namen de klachten zichtbaar af.
- ... een duidelijke verbetering in de seksuele functionaliteit. **89%** van de deelnemende vrouwen ervoer na de behandeling meer seksueel genot en **81%** minder seksuele onvrede.
- ... een merkbare verbetering van de vaginale laxiteit. Bij **78%** werd de vaginawand strakker.
- ... een aanzienlijke vermindering van overige vaginale klachten. **89%** ervoer na de behandeling minder klachten op het gebied van irritaties, droogheid, jeuk, branderig gevoel en pijn in en rondom de vagina.
- ... een zichtbare verbetering van het uiterlijk van de vulva. $\frac{2}{3}$ gaf aan dat de verbetering tussen de **50%** en meer dan **80%** was**.

89%
meer seksueel genot

81%
minder seksuele onvrede

70%
minder incontinentieklachten

89%
minder vaginale klachten

78%
verbeterde vaginale laxiteit

66%
** zichtbaar verbeterd uiterlijk van de vulva

Beoordeling deelnemers

Na de studie vroegen wij de deelnemers hun waardering te geven over Silk'n Tightra. Dit deden we aan de hand van de volgende vragen:

Vraag	Totaal niet tevreden	Niet tevreden	Neutraal	Een beetje tevreden	Heel erg tevreden
Hoe tevreden bent u in het algemeen met Silk'n Tightra?	0%	0%	18.5%	11.1%	70.4%
Hoe tevreden bent u over de veiligheidsgraad van het gebruik van Silk'n Tightra?	0%	0%	3.7%	11.1%	85.2%
Hoe tevreden bent u over de moeilijkheidsgraad van het gebruik van Silk'n Tightra?	0%	0%	3.7%	18.5%	77.8%
Hoe tevreden bent u over het gemak van het leren gebruiken van Silk'n Tightra?	0%	0%	3.7%	11.1%	85.2%
Hoe tevreden bent u over de verbetering van het uiterlijk van uw schaamlippen na het gebruik van Silk'n Tightra?	0%	0%	50.0%	33.3%	16.7%
Vraag	Geen verbetering	< 50% verbetering	< 80% verbetering	> 20% verbetering	> 80% verbetering
In hoeverre is het uiterlijk van uw schaamlippen verbeterd na het gebruik van Silk'n Tightra?	16.7%	16.7%	33.3%	0%	33.3%

Eindconclusie

Deze studie geeft aan dat Silk'n Tightra een veilige en effectieve techniek biedt die thuis makkelijk gebruikt kan worden. Het verbetert stressincontinentie, seksuele tevredenheid, andere vaginale klachten en het uiterlijk van de labia en het verstrakt de vagina en vulva. Een grote en algemene verbetering dus voor het genot van de vrouwelijke seksualiteit en de kwaliteit van haar leven!

* Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Home Skinovations Ltd.

Medisch directeur: Prof.Dr. med. Klaus-Peter Wilhelm, dermatoloog
Directeur Operations/Hoofdonderzoeker: Dipl.-Phys. Marianne Brandt
Kliniek: proDERM Instituut voor Toegepast Dermatologisch Onderzoek,
Schenefeld/Hamburg, Duitsland
Datum: 28 januari tot 25 maart 2019

- 27 vrouwelijke proefpersonen van 25 tot 65 jaar, die op zoek waren naar een oplossing voor vaginale verstrakking, namen deel aan het onderzoek.
- Deelnemers voldeden aan alle criteria voor inclusie/exclusie en hebben een toestemmingsverklaring ondertekend.
- Deelnemers namen deel aan twaalf inwendige behandelingsessies; 3 x 20 minuten per week, gedurende vier weken. Deelnemers die ook het uiterlijk van hun schaamlippen wilden verbeteren, deden acht extra uitwendige behandelingen (2 x per week in de eerste maand).
- De patiënten volgden de onderzoeksprocedure en het schema, inclusief de vervolfbezoeken. Gedurende de gehele onderzoeksperiode zagen zij af van andere vaginale behandelmethoden.